

Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto příbalovou informaci. Obsahuje důležité údaje, jak tento přípravek používat. Pokud máte další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, nebo kontaktujte přímo nás.

Boston® Simplus®

Boston Simplus je jedнокrokový roztok určený k čištění, dezinfekci a udržování fluorosilikonakrylátových a silikonakrylátových tvrdých plynopropustných kontaktních čoček. Roztok odstraňuje z povrchu čoček proteiny, tuky a omezuje tvoření těžko odstranitelných usazenin. Je vhodný k oplachování čoček a jejich zvlhčení. Díky svému složení má také uklidňující vliv na oči a obsažené konzervační látky eliminují škodlivé mikroorganismy. Roztok je tedy účinný pro čištění i dezinfekci vašich čoček a zároveň vhodný pro oko po nasazení čočky.

Složení:

Sterilní vodný pufrovaný roztok obsahuje poloxamin, hydroxyalkylfosforitan, kyselinu boritou, boritan sodný, chlorid sodný, hydroxypropylmethyl celulózu a Glucam, a je konzervovaný chlorhexidin glukonátem (0,003%) a polyaminopropyl biguanidem (0,0005%).

Návod na použití:


Aby byl zajištěn správný účinek roztoku, dodržujte všechny popsane kroky.

- Důkladně si umyjte a osušte ruce.
- Umístete čočku do prázdného pouzdra a doplňte čerstvým roztokem Boston Simplus.
- Máčete čočku v roztoku Boston® Simplus® nejméně 4 hodiny.
- Umyjte si ruce znovu před čištěním. Po máčení, vyjměte čočku z pouzdra a jemně ji mněte s pár kapkami roztoku v dlani po dobu 20 vteřin. (Není třeba dalšího enzymatického čističe.)
- Oplachujte čočku 5 vteřin roztokem Boston® Simplus® pro odstranění uvolněných usazenin a čočku vložte do oka.
- Opatrně vyčistěte pouzdro horkou vodou a nechte vyschnout.

Upozornění:

- Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli složku přípravku.
- Nepoužívejte na měkké (hydrofilní) čočky.
- Postup péče o kontaktní čočky doporučený Vaším očním specialistou musí být denně dodržován. Opomenutí může způsobit oční infekci.
- Nedotýkejte se koncovkou lahvičky žádného povrchu ani oka, mohlo by dojít ke kontaminaci roztoku nebo poranění oka.
- Vždy si umyjte ruce před zacházením s čočkami.
- Nikdy nepoužívejte stejný roztok opakovaně, použijte čerstvý roztok pro čištění a dezinfekci.
- Lahvičku uchovávejte vždy uzavřenou, aby se zabránilo odpařování a kontaminaci roztoku.
- Bez lékařského dohledu nepoužívejte žádné oční léky ve spojení s tímto roztokem.
- Vyhodte lahvičku se zbytkem roztoku po 90 dnech od prvního použití.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pouzdra na čočky mohou být zdrojem mikrobiální kontaminace a podráždění očí. Proto je potřeba je denně čistit a vyplachovat a ponechat vyschnout na vzduchu. Pouzdro je potřeba často obměňovat.

Důležité: V případě výskytu a přetrvání podráždění, nadměrného slzení nebo rozmazaného vidění, vyjměte čočky z oka a neodkladně se poraďte se svým očním specialistou.

Uchovávejte při teplotě 1-30°C. 



Bausch&Lomb Incorporated, Rochester, New York 14609, USA



Bausch&Lomb Incorporated, 105 London Road, Kingston Upon Thames KT2 6TN, UK

Vyrobeno v Itálii



Distributor: Steplon s.r.o., Stružky 1326, 19800 Praha 9 – Kyje

Bausch & Lomb, Boston a Boston Simplus jsou ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated.

Datum poslední revize: září 2015