

## Max OptiFresh Roztok na kontaktní čočky

Sterilní, vodní, isotonický roztok.

**Složení:** - chlorid sodný a draselný; - edetát disodný; - Polyhexanid-1ppm; - Poloxamer-0,6mg/ml; - Hypromelosa-1,5mg/ml a pufrovaný fosforečnan sodný; - do 100% objemu doplněno čištěnou vodou

Max OptiFresh je kombinací čtyř agentů, kteří vyčistí vaše čočky, efektivně odstraňují bílkoviny, udržují čočky bez mikrobů a udržují čočky vlhké, takže jsou pohodlné pro oči. pH roztoku je shodné s pH slzného filmu.

### Indikace

Max OptiFresh je víceúčelový roztok čistí, oplachuje, dezinfikuje, maže, zvlhčuje a ukládá měkké kontaktní čočky. Je vhodný pro každodenní odstranění bílkovin z čoček.

### Výhody Max OptiFresh

**Polyhexanid** - dezinfekční a konzervační látka s výkonným biocidním účinkem. Chrání čočky před choroboplodnými zárodky a bakteriemi.

**Poloxamer** – jemná, povrchově aktivní látka a čisticí prostředek, který odstraňuje bílkoviny, nečistoty a usazeniny.

**Hypromelóza** – lubrikuje kontaktní čočky, udržuje je vlhké a zároveň na nich tvoří ochranný štít pro dlouhotrvající pohodlí očí.


**Pufrovaný fosforečnan sodný** - udržuje pH roztoku vyvážené a zvyšuje jeho výkon pomocí přidaných elektrolytů draslíku a chloridu sodného pro pouze přirozené opotřebení čoček.

### Návod na použití:

- před úkonem si umyjte a pečlivě osušte ruce
- po použití opatrně vyjměte čočku z oka a vložte ji do pouzdra naplněného lehce pod okraj čistým roztokem Max OptiFresh
- stejný postup zopakujte i s

druhou čočkou

- zavřete pouzdro a nechte působit minimálně 6 hodiny nebo přes noc

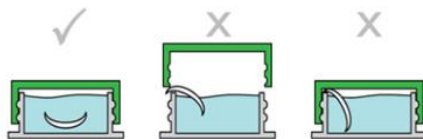

### Rychlé čištění:

- před úkonem si umyjte a pečlivě osušte ruce
- vyjměte čočku z oka, položte si ji na dlaň a přidejte dostatečné množství roztoku Max OptiFresh pro navlhčení čočky
- v dlani promněte čočku z obou stran prstem druhé ruky po dobu alespoň 10 sekund
- čočku poté důkladně opláchněte roztokem Max OptiFresh a vložte do pouzdra s připraveným roztokem
- stejný postup opakujte i s druhou čočkou

- v pouzdře nechte roztok na čočky působit ideálně 4 hodiny

**Kontraindikace:** Nejsou známé žádné vedlejší účinky kromě případných alergií nebo speciálních přecitlivělostí.

**Bezpečnostní opatření:** Max OptiFresh se musí po každém použití dobře uzavřít a po otevření do 3 měsíců spotřebovat. Nepoužívejte po datu spotřeby!

Kapátko nedávejte do styku s jinými předměty, nebo okem. Skladujte ideálně v rozmezí teplot od 20 do 30°C. Nepoužívejte, pokud byl poškozen uzávěr!

**Upozornění:** Kontaktní čočky, které ležely v roztoku Max OptiFresh déle než 3-4 týdny, nekládejte do očí. Čočky vyjměte z pouzdra, a opláchněte čerstvým roztokem Max OptiFresh. Uchovávejte mimo dosah dětí! Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na některou z obsažených látek. Současné používání jakéhokoliv očního léku konzultujte s vaším očním lékařem. Nikdy nepoužívejte obyčejnou vodu na kontaktní čočky!

**Komplikace:** Při nesnášenlivosti nebo podráždění přerušete aplikaci

čoček a vyhledejte odborníka. Dodržujte instrukce uvedené v příbalovém letáku a na obalu.

**Výrobce:** STERICON, PHARMA PVT LTD, Bangalore, Indie

**Vyrobeno pro:** MAXVUE VISION SDN BHD, 614-1, Jalan Haruan 4/8, Oakland Commercial Centre, 70300 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia

**Dovozce do ČR:** Wixi, s.r.o. Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady, Česká republika

EC REP

MYM STC, SL. Avda. De los, Rosales 32, 28935 Móstoles Madrid, Spain

ISO9001

CE0434